

# Cómo inyectar tirzepatida usando la pluma precargada KwikPen® multidosis

La pluma precargada KwikPen® multidosis es para uso en un solo paciente.


**Contiene 4 dosis fijas, aplicada semanalmente, exactamente como tu médico te indique.** Inyecta 0.6 mL en una sola inyección, debajo de la piel (por vía subcutánea), **exactamente como tu médico te indique.**

## IMPORTANTE

1. Después de 4 dosis, tira a la basura la pluma precargada KwikPen® multidosis, incluso si tiene restos de medicamento. La pluma precargada KwikPen® multidosis te impedirá marcar una dosis completa de 0.6 mL después de haberte administrado las 4 dosis.
2. **No** inyectes el medicamento sobrante. **No** transfieras el medicamento de tu pluma precargada KwikPen® multidosis a una jeringa.
3. Desecha la pluma precargada KwikPen® multidosis después de recibir las 4 dosis. Intentar inyectar cualquier medicamento sobrante podría resultar en una dosis incompleta, aunque la pluma precargada KwikPen® aún tenga medicamento.
4. **No** compartas la pluma precargada KwikPen® multidosis con otras personas, incluso si se ha cambiado la aguja de la pluma. Podrías transmitir una infección grave a otras personas o podrías contraer una infección grave de ellas.
5. Las personas con ceguera o con problemas de visión no deben usar la pluma precargada KwikPen® multidosis sin la ayuda de una persona capacitada para usarla.

## Guía de las partes

### Partes de la pluma precargada KwikPen® multidosis

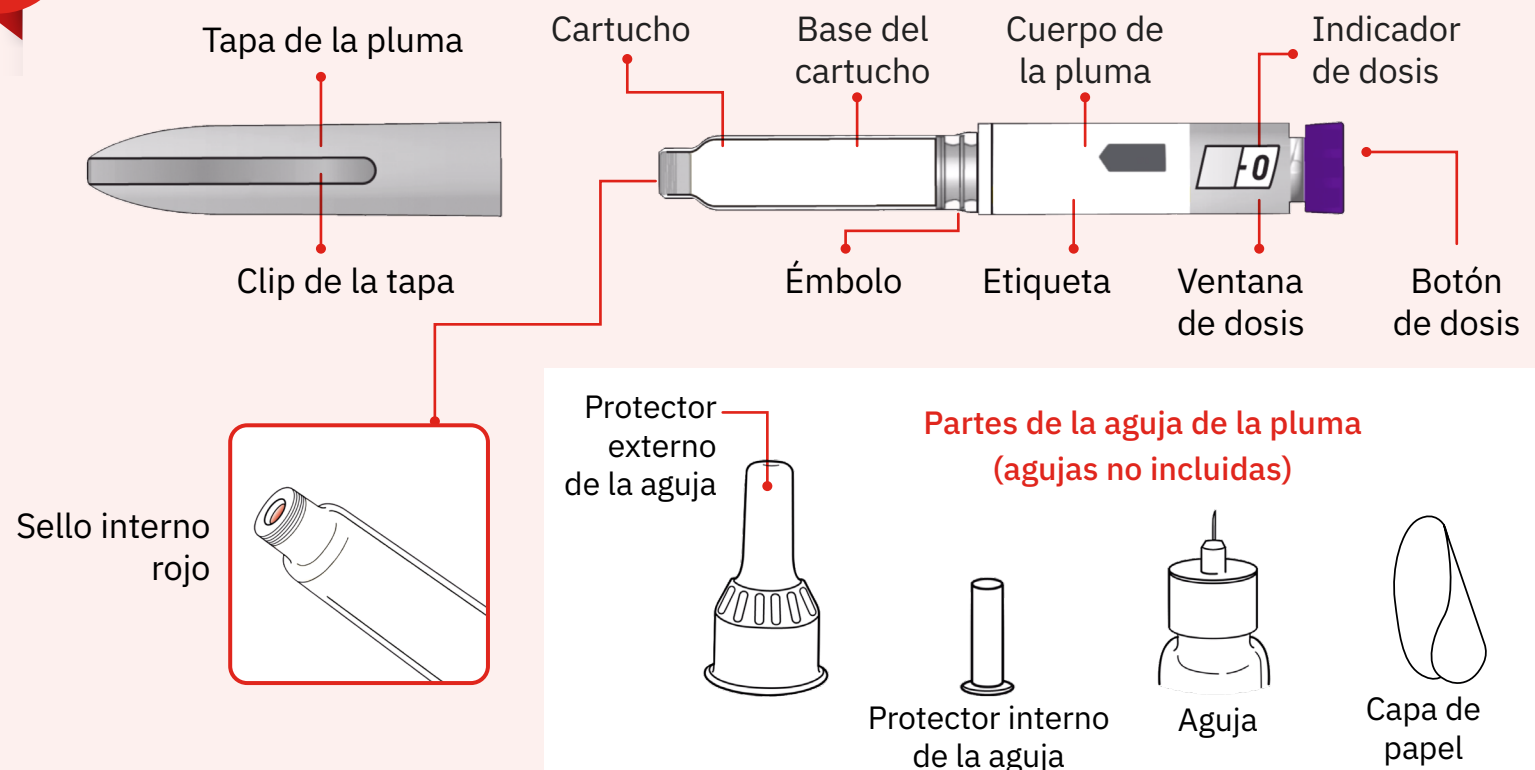



## Materiales necesarios para administrar tu inyección

- ✓ Pluma precargada KwikPen® multidosis.
- ✓ Gasa o bola de algodón.
- ✓ Aguja compatible con la pluma precargada KwikPen® multidosis.
- ✓ Contenedor para eliminación de objetos punzantes o contenedor casero.
- ✓ Toallita impregnada con alcohol.




## Preparación para inyectar

Paso

1


- ▷ Lávate las manos con agua y jabón.

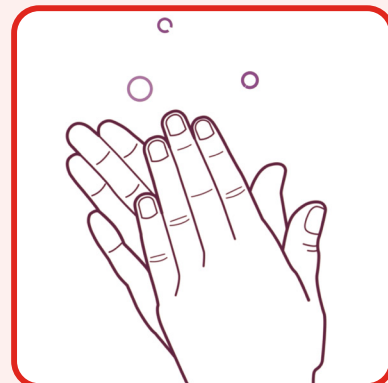

Paso

2

- ▷ Retira la tapa de la Pluma precargada KwikPen® multidosis en línea recta.
- ▷ Revisa la Pluma precargada KwikPen® multidosis y la etiqueta.

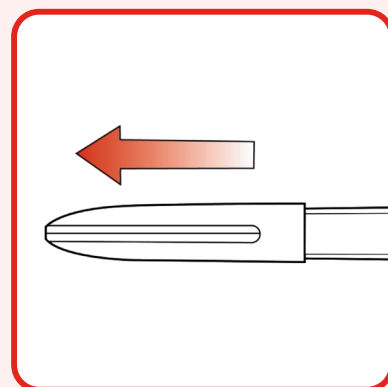


**No la uses si:**

- El nombre del medicamento o la concentración de la dosis no coincide con su receta.
- La pluma precargada KwikPen® multidosis está caducada o parece dañada.
- El medicamento ha sido congelado, tiene partículas, está turbio o descolorido. El medicamento debe ser incoloro a ligeramente amarillo.

## Paso

# 3


- ▶ Limpia el sello interno rojo con una toallita impregnada con alcohol

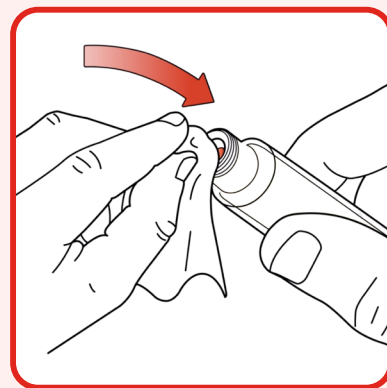

## Paso

# 4


- ▶ **Selecciona una aguja nueva para la pluma.** Siempre usa una aguja nueva para cada inyección, esto te ayudará a prevenir infecciones y a prevenir obstrucciones en las agujas.
- ▶ Retira la capa de papel del protector externo de la aguja.

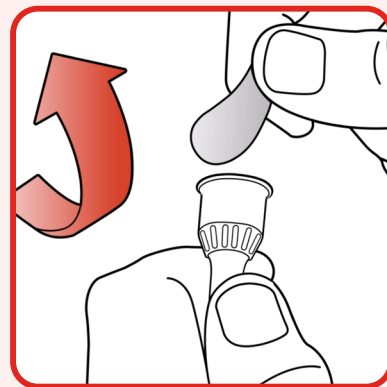

## Paso

# 5



- ▶ Empuja la aguja tapada directamente sobre la pluma precargada KwikPen® multidosis y gira la aguja hasta que esté bien ajustada.

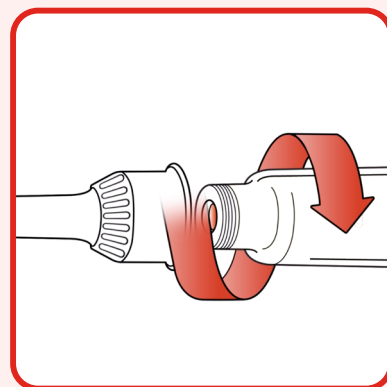

## Paso

# 6

- A.** Retira el protector externo de la aguja y guárdalo. Se reutilizará.
- B.** Retira el protector interno de la aguja. Tíralo en la basura.

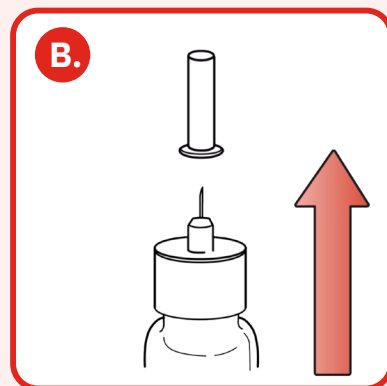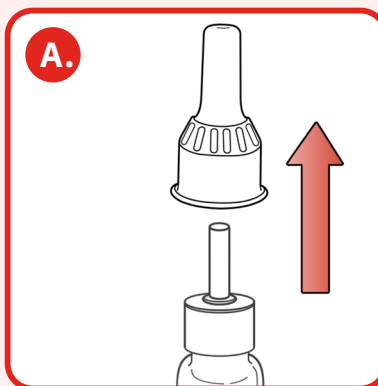


## Paso

# 7

- ▶ Gira lentamente el botón de dosis hasta que escuches **2 clics** y la línea extendida se muestre en la ventana de dosis.


Esta es la posición de purga. Puede corregirse girando el botón de dosis en cualquier dirección hasta que la posición de purga se alinee con el indicador de dosis.

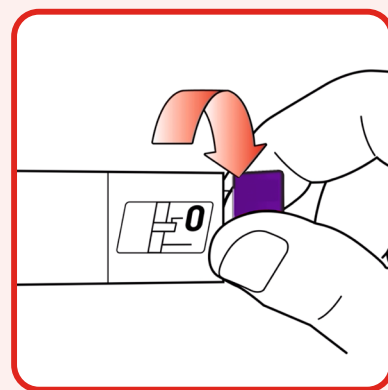

## Paso

# 8


- ▶ Sostén la pluma precargada con la aguja apuntando hacia arriba.
- ▶ Golpea suavemente la base del cartucho para empujar las burbujas de aire en la parte superior.

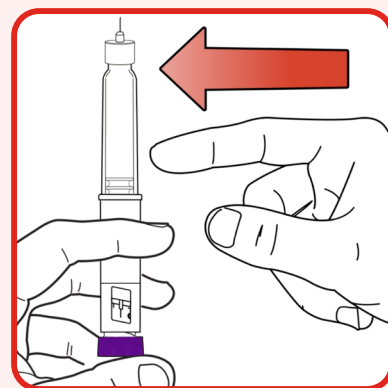

## Paso

# 9

- ▶ Libera un poco del medicamento en el aire **presionando el botón de dosis** hasta que se detenga, luego **cuenta lentamente hasta 5 mientras mantienes presionado el botón de dosis**.
- ▶ El ícono [0] debe mostrarse en la ventana de dosis.
- ▶ **No lo inyectes en tu cuerpo.**

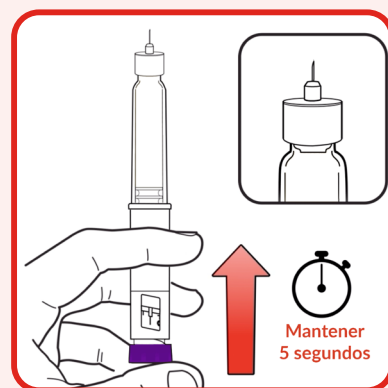

**NO OLVIDES PURGAR TU DISPOSITIVO en cada aplicación**

El purgado elimina el aire del cartucho y asegura que la pluma esté funcionando correctamente. Tu pluma se ha purgado si sale una pequeña cantidad de medicamento de la punta de la aguja de la pluma.


- Si no ves medicamento, repite los **pasos 7 a 9**, no más de 2 veces adicionales.
- Si aún no ves medicamento, cambia la aguja de la pluma y repite los **pasos 7 a 9**, no más de 1 vez adicional.
- Si aún no ves medicamento, comunícate con Lilly.



# Inyectando el medicamento


## Paso 10

- Elige un sitio de inyección.
  - A. Tú u otra persona puede inyectar el medicamento en tu muslo o estómago (abdomen) al menos a 5 centímetros de distancia del ombligo.
  - B. Otra persona debe administrarte la inyección en la parte superior de su antebrazo.
- **Cambia (rota)** el sitio de inyección en cada aplicación. Puedes usar la misma área de tu cuerpo, pero asegúrate de elegir un sitio de inyección diferente en esa área.

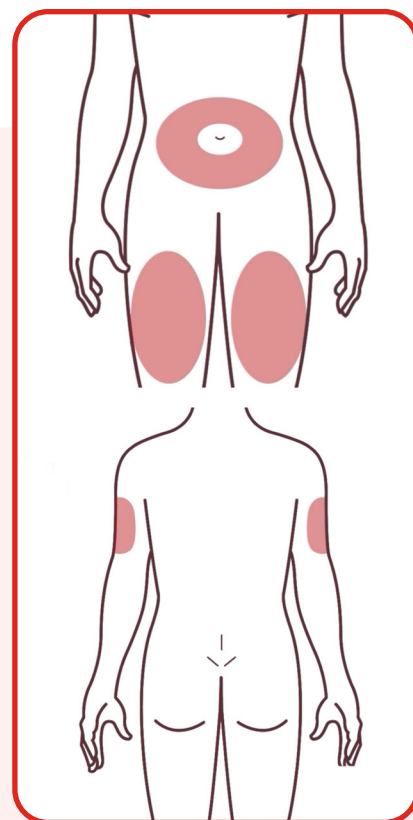



## Paso 11

- Gira el botón de dosis hasta que se detenga y el ícono **1** se muestre en la ventana de dosis.  
El ícono **1** equivale a una dosis completa de 0.6 mL.

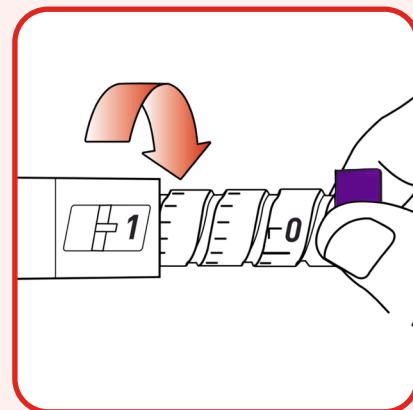

## Paso 12


- A. Inserta la aguja en la piel.
- B. Inyecta el medicamento **presionando el botón de dosis** hasta que se detenga, luego **cuenta lentamente hasta 5 mientras mantienes presionado el botón de dosis**. El ícono **0** debe mostrarse en la ventana de dosis antes de retirar la aguja.

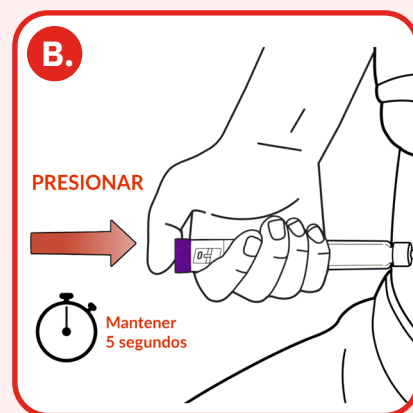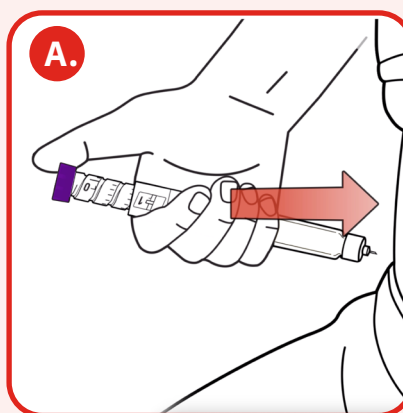

Paso

13

- ▶ Retira la aguja de tu piel. Es normal que haya una gota de medicamento en la punta de la aguja. No afectará tu dosis.
- ▶ Confirma que el ícono **0** esté en la ventana de dosis.
- ▶ Si ves el ícono **0** en la ventana de dosis, has recibido la dosis completa.
- ▶ Si no ves el ícono **0** en la ventana de dosis, vuelve a insertar la aguja en tu piel y termina la inyección. **No** vuelvas a marcar la dosis.

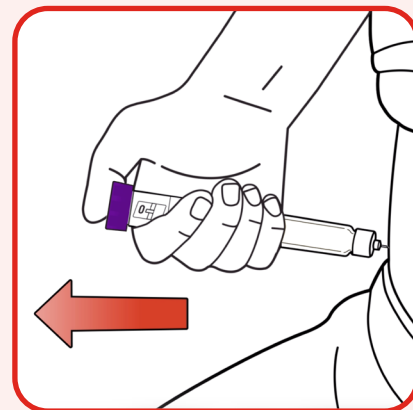


## Después de tu inyección

Paso

14

- ▶ Si ves sangre después de retirar la aguja de tu piel, presiona ligeramente el sitio de inyección con una gasa o un bola de algodón.


**No** frotes el sitio de inyección.

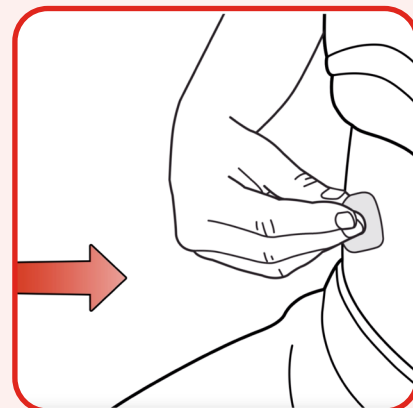

Paso

15


- ▶ Vuelve a colocar cuidadosamente el protector externo de la aguja.

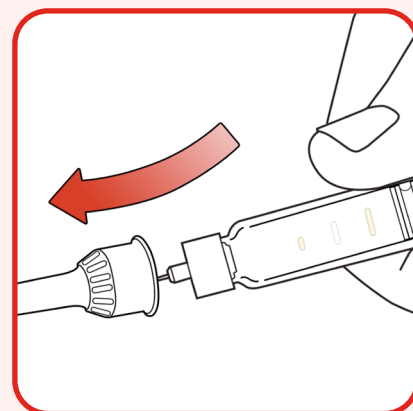

Paso

16


- ▶ Desenrosca la aguja con el protector externo y tírala en un contenedor para objetos punzantes.
- ▶ **No** conserves la pluma precargada KwikPen® multidosis con la aguja puesta, a fin de evitar fugas, obstrucción de la aguja y entrada de aire.

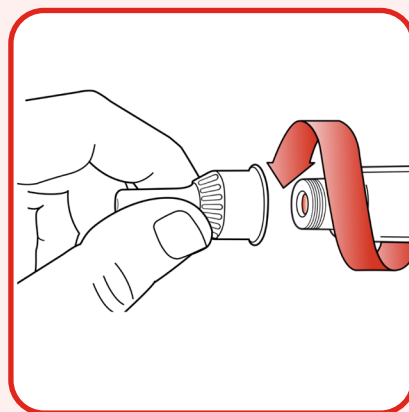

Paso

17

- ▶ Vuelve a colocar la tapa de la pluma precargada KwikPen® multidosis.
- ▶ **No** conserves la pluma precargada KwikPen® multidosis sin la tapa puesta.

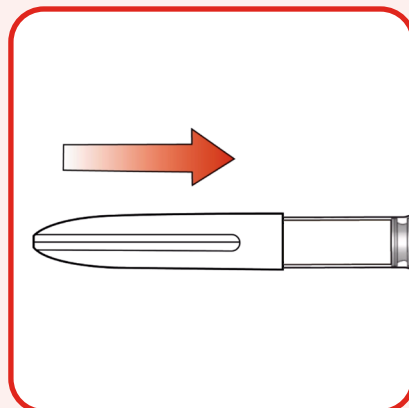

## Conservación de la pluma precargada KwikPen® multidosis

### Sin usar:

2°C - 8°C



- Conserva la pluma precargada KwikPen® multidosis sin usar en el refrigerador entre 2°C y 8°C.
- La pluma precargada KwikPen® multidosis sin usar puede utilizarse hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta, siempre y cuando se haya mantenido en el refrigerador.
- No congeles la pluma precargada KwikPen® multidosis. Tira a la basura la pluma precargada KwikPen® multidosis si esta ha sido congelada.

## Usada:



- Puedes conservar la pluma precargada KwikPen® multidosis **usada** a no más de 30°C después de tu inyección.
- Manténla alejada del calor y la luz.
- Mantén la pluma precargada KwikPen® multidosis y las agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Desecha la pluma precargada KwikPen® multidosis 30 días después del primer uso, aunque tenga medicamento sobrante.
- Desecha la pluma precargada KwikPen® multidosis después de recibir las 4 dosis. Intentar inyectar cualquier medicamento sobrante podría resultar en una dosis incompleta, aunque la pluma precargada aún tenga medicamento.



## Disposición de la pluma precargada KwikPen® multidosis y de las agujas

- Coloca las agujas usadas en un contenedor de eliminación para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- **No** tires las agujas sueltas en la basura doméstica.
- Tira la pluma precargada KwikPen® multidosis usada, en la basura doméstica o en un contenedor de eliminación para objetos punzantes después de haber retirado la aguja.
- Si no tienes un contenedor de eliminación para objetos punzantes, puedes usar un contenedor doméstico que:
  - Esté hecho de plástico resistente
  - Pueda cerrarse con una tapa hermética y resistente a las perforaciones, sin que los objetos punzantes puedan salir
  - Se mantenga en posición vertical y estable durante el uso
  - Sea resistente a fugas
  - Esté etiquetado adecuadamente para advertir sobre los desechos peligrosos dentro del contenedor

